



Pupillen Distanz -Messen

Pupillen **D**istanz = PD ist der Abstand der Pupillenmitten beider Augen. Die Messung erfolgt für jedes Auge von der Nasenmitte bis zum Pupillenmittelpunkt des rechten bzw. linken Auges einzeln.
Falls keine Daten zur Hand sind, bitte den PD-Messer ausschneiden und die Werte messen, anschliessend in die Bestellmaske eintragen.

Bitte Beachten !


Nach Ausdruck bitte unbedingt prüfen, ob die angegebene Strecke genau 8 cm beträgt, dann ausschneiden und an der gestrichelten Linie falten - wenn möglich dickeres Papier benutzen !

(Wenn die nachgemessene Strecke nicht 8 cm beträgt, senden Sie uns Ihren gemessenen Wert per Email an info@brillebitte.de - wir errechnen den Korrekturwert für Sie - einfacher geht es kaum !)

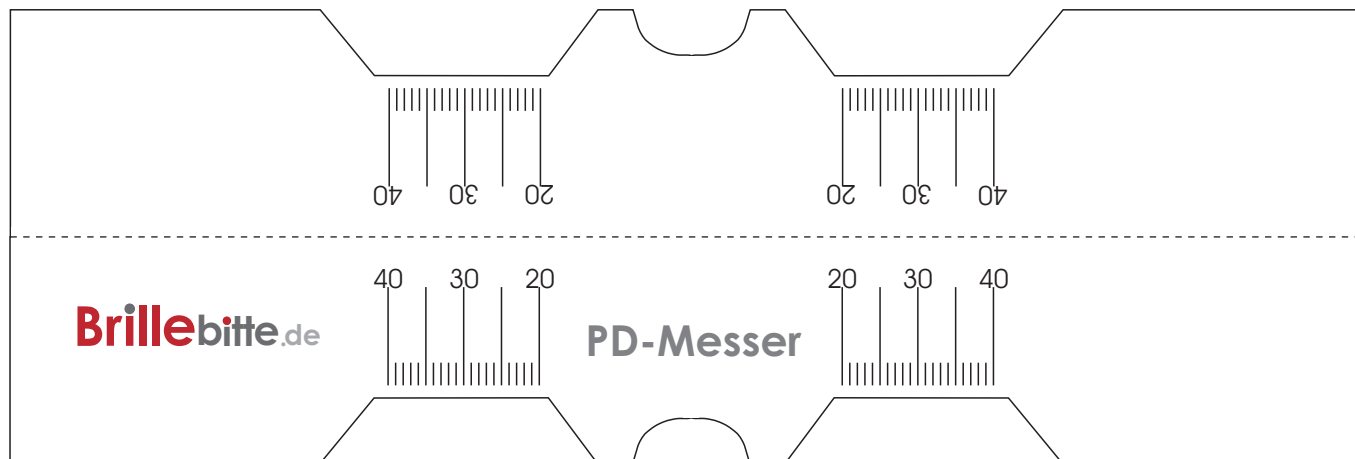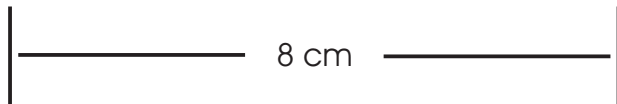

cre@ted by uline

Brillebitte.de
internet shop

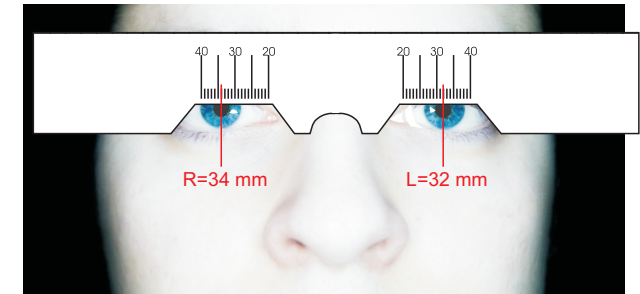

Die Messung geschieht vor einem Spiegel nach folgender Methode - mit der einen Hand das PD-Maß auf die Nasenwurzel setzen, mit der anderen Hand das linke Auge abdecken und geradeaus Schauen und den Wert messen, anschliessend das rechte Auge abdecken und den linken Wert genauso ermitteln.

Haben Sie noch Fragen, so rufen Sie uns gern an

Telefon **05531 -1274033**

Mo - Fr 10 - 19 Uhr

Sa 10 - 12 Uhr